

Instrukcja zakładania maski AirFit N10



- Ustaw maskę tak, aby szara strona mocowania na głowę oraz widoczne na nim logotypy ResMed i AirFit N10 były skierowane na zewnątrz.
- Odlącz dolne paski. Ustaw poduszkę tak, aby jej dolna część przylegała do spodu nosa.



- Przyłóż poduszkę do nosa.
- Przytrzymaj maskę przy twarzy.
- Naciągnij paski na głowę.



- Przeciągnij dolne paski pod uszami i połącz klamki EasyClick z oprawką.



- Odblokuj zaczepy górnych pasków.
- Wyreguluj paski po obu stronach tak, aby maska wygodnie przylegała pod nosem, a następnie ponownie zablokuj zaczepy, aby górne i dolne paski były dobrze zamocowane.



- Odblokuj zaczepy dolnych pasków. Wyreguluj paski tak, aby maska była stabilnie zamocowana, a następnie ponownie zablokuj zaczepy.
- Podłącz przewód maski do przewodu powietrznego urządzenia.



- Włącz urządzenie, aby wtaczało powietrze do przewodu.
- Wyreguluj poduszkę i paski, aby maska wygodnie przylegała do nosa i nie była zagięta ani przekrzywiona.
- Maska jest gotowa do użycia.

WSKAZÓWKA: Aby maska dokładnie przylegała do twarzy i wygodnie leżała, należy prawidłowo zamocować górne paski. Pamiętaj, aby nie zaciskać ich zbyt mocno.

WSKAZÓWKA: Wystarczy minimalnie naciągnąć dolne paski, aby maska szczelnie przylegała do twarzy.

Uwaga: Szczegółowe instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.



- Pacjent może umieścić dolną część mocowania na głowę nad lub pod włosami, zależnie od indywidualnych preferencji.
- Możliwość założenia opcjonalnych miękkich osłonek, które chronią policzki.



Wygoda i wydajność

Maska z poduszkami nosowymi AirFit™ N10 należy do nowej serii produktów AirFit firmy ResMed, które dopasowują się do pacjentów. Jej ponadprzeciętna wydajność oraz walory użytkowe wyznaczają nowy standard jakości masek z poduszkami nosowymi. Maska AirFit N10 jest wygodna, można ją łatwo i intuicyjnie założyć, a oprawka przylegająca do twarzy pod linią wzroku nie ogranicza pola widzenia.

Prostota

Klamki EasyClick umożliwiają łatwe połączenie oprawki z mocowaniem na głowę. Do maski można łatwo przypiąć poduszkę, jest ona również wyposażona w wytrzymały, a zarazem bardzo elastyczny krótki przewód.

Wygoda

Miękka poduszka, paski SoftEdge™ oraz opcjonalne miękkie osłonki zwiększają komfort pacjenta. Ponadto powietrze odprowadzane z maski jest rozpraszane, dzięki czemu hałas nie przeszkadza pacjentowi ani jego najbliższemu.

Nieograniczone pole widzenia

Dzięki kompaktowej konstrukcji i smukłej oprawce umieszczonej pod linią wzroku maska AirFit N10 nie ogranicza pola widzenia użytkownika.

Najchętniej wybierana

Maski AirFit N10 gwarantują wygodę użytkowania, a także niezawodność działania, do której przywykli pacjenci korzystający z rozwiązań firmy ResMed. Jak wykazały badania¹ przeprowadzone niedawno przez firmę ResMed, pacjenci zdecydowanie chętniej wybierali maskę AirFit N10 niż popularne maski oferowane przez innych producentów. Uznana za numer jeden pod względem prostoty użytkowania, stabilności, wygody i nieinwazyjności. Możesz mieć pewność, że maska AirFit N10 to właściwy wybór.



Maska AirFit N10 – funkcje i korzyści


Mocowanie na głowę SoftEdge jest wykonane z wysokiej jakości tkaniny o podwiniętych brzegach, która zwiększa komfort użytkowania i nie odciska śladów na twarzy.



Mocowanie na zatrzask pozwala szybko i łatwo podłączyć i odłączyć poduszkę.

Okrągły zawór odprowadza powietrze i rozprasza je, dzięki czemu pacjent oraz jego najbliżsi mogą spać spokojnie.

Lekki, wytrzymały i elastyczny przewód jest zintegrowany z oprawką. Dzięki konstrukcji umożliwiającej łatwe rozciąganie i zginanie pod kątem 360° przewód dostosowuje się do ruchów śpiącego pacjenta i gwarantuje szczelne przyleganie maski przez cały czas.

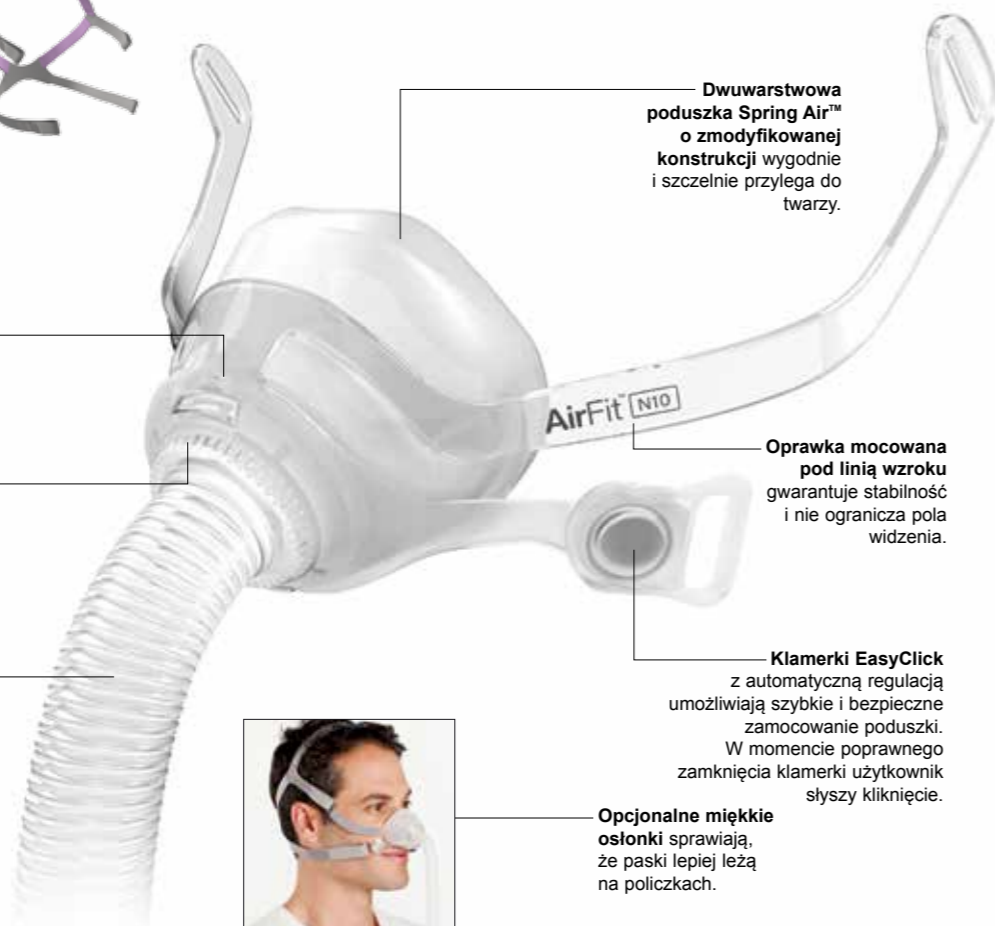

Dwuwarstwowa poduszka Spring Air™ o zmodyfikowanej konstrukcji wygodnie i szczelnie przylega do twarzy.


Oprawka mocowana pod linią wzroku gwarantuje stabilność i nie ogranicza pola widzenia.

Klamerki EasyClick z automatyczną regulacją umożliwiają szybkie i bezpieczne zamocowanie poduszki. W momencie poprawnego zamknięcia klamerki użytkownik słyszy kliknięcie.

Opcjonalne miękkie osłonki sprawiają, że paski lepiej leżą na policzkach.



Elementy składowe maski AirFit N10

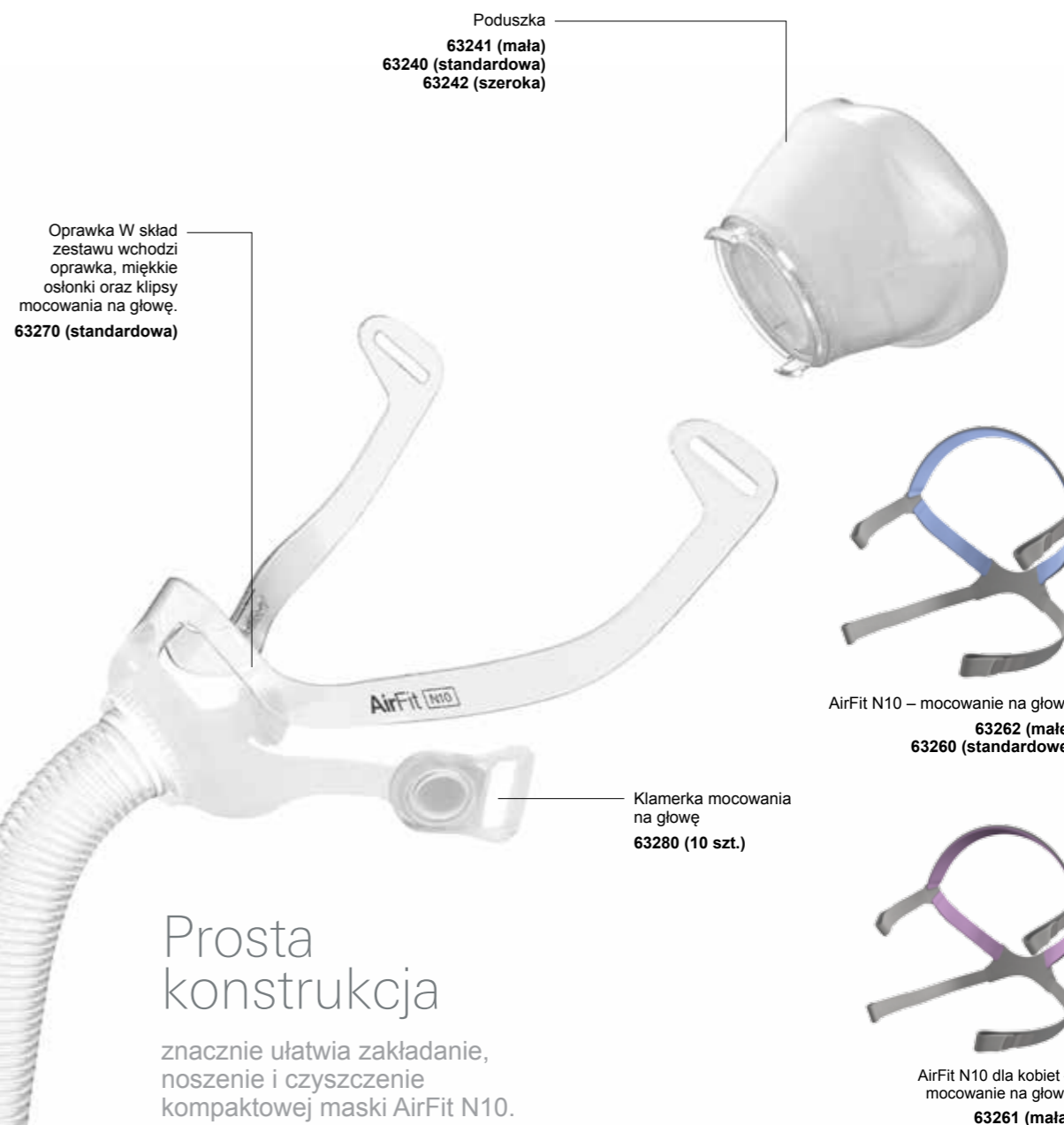

Poduszka
63241 (mała)
63240 (standardowa)
63242 (szeroka)

Oprawka W skład zestawu wchodzi oprawka, miękkie osłonki oraz klipsy mocowania na głowę.
63270 (standardowa)

AirFit N10 – mocowanie na głowę
63262 (małe)
63260 (standardowe)

Klamerka mocowania na głowę
63280 (10 szt.)

AirFit N10 dla kobiet – mocowanie na głowę
63261 (mała)

Prosta konstrukcja

znacznie ułatwia zakładanie, noszenie i czyszczenie kompaktowej maski AirFit N10.

Kody produktów

	Europa 1	Europa 2	Europa 3
Maska AirFit N10 dla kobiet – mała	63210	63213	63216
Maska AirFit N10 – mała*	63227	-	-
Maska AirFit N10 – standardowa	63209	63212	63215
Maska AirFit N10 – szeroka	63211	63214	63217

Europa 1: angielski (Wielka Brytania), francuski, niemiecki i włoski (Szwajcaria)
Europa 2: angielski, duński, estoński, fiński, norweski i szwedzki
Europa 3: angielski, czeski, niemiecki (Belgia), francuski (Belgia), niemiecki (Belgia), grecki, węgierski, włoski, polski, portugalski, rosyjski, słowacki, hiszpański i turecki

AirFit™ N10
Nasal mask

¹ W porównaniu z innymi najpopularniejszymi na rynku maskami z poduszkami nosowymi. Badanie D632-105 przeprowadzone przez firmę ResMed w sierpniu 2013 roku i D632-124 przeprowadzone w listopadzie 2013 roku. Badania zostały przeprowadzone na 35 osobach.

* Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Uwaga: Modele szeroki i standardowy maski AirFit N10 są dostarczane z mocowaniem na głowę w standardowym rozmiarze (kolor niebieski). Maska AirFit N10 dla kobiet jest dostarczana z mocowaniem na głowę w małym rozmiarze (kolor różowy). Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika.